

BOSTON GLAZE

ГЛАЗУР ДЛЯ КОМПОЗИТІВ



ARKONA

MD Медичний виріб класу IIa

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

BOSTON GLAZE призначена для отримання характерних для зубів блиску та гладкості всіх видів реконструктивних робіт. Може застосовуватись для матеріалів хімічного та світлового затвердіння а також склоіономерів при виконання таких робіт: пломбування, inlay/onlay, коронки, мости та шини для стабілізації зубів. Особливо рекомендується застосовувати як останній шар протетичних робіт, виконаних з композитів для постійних реставрацій.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

1. Підготовка поверхні для BOSTON GLAZE не вимагає застосування адгезивної системи.
2. Очистіть та осушіть поверхні, призначені для глазурування. У випадку сильно забруднених поверхонь, нанесіть ETCHMASTER. Застосування BOSTON GLAZE не вимагає попереднього вирівнювання поверхні. BOSTON GLAZE уможливиє отримання гладких і блискучих поверхонь без їх механічного полірування.
3. Рівномірно нанесіть BOSTON GLAZE по всій поверхні реставрації. У випадку нанесення шару, товщиною більше 0,5 мм, можлива зміна кольору на більш жовтий.
4. Опромінюйте згідно таблиці полімеризації.

ТАБЛИЦЯ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Лампа	Час опромінення
Halogen/LED (500-800 мВт/см ²)	40 с
LED (>800 мВт/см ²)	30 с

СКЛАД

Суміш диметакрилових смол (BisGMA, BisEMA, HEMA) з додаванням каталізаторів, інігіторів, системи фотоініціації (CQ : DMAEMA).

Затвердіння BOSTON GLAZE відбувається шляхом вільнорадикальної полімеризації, активованої видимим світлом синього кольору (400–500 nm).

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не застосовувати BOSTON GLAZE у пацієнтів з вираженою чутливістю на будь-який компонент матеріалу.

ПОБІЧНА ДІЯ

Побічна дія матеріалу BOSTON GLAZE не була виявлена, однак, у осіб з підвищеною чутливістю не можна виключити виникнення ознак алергії. При проявах алергічної реакції негайного типу, слід припинити застосування матеріалу. При проявах віддаленої алергічної реакції, слід замінити реконструкцію.

ОБМЕЖЕННЯ У ЗАСТОСУВАННІ, ВЗАЄМОДІЯ

Не застосовувати у випадку, коли неможлива повна ізоляція роботи від вологи, слини чи крові. Забруднення можуть порушити процес полімеризації. Не допускати прямого контакту з матеріалами, що містять фенолові сполуки, зокрема з евгенолом або тимолом. Ці сполуки можуть порушувати процес полімеризації BOSTON GLAZE.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Уникати контакту неполімеризованого матеріалу зі шкірою, м'якими тканинами ротової порожнини та очима. У разі контакту, негайно промити великою кількістю води. У разі виникнення відчуття недуги, звернутися за медичною допомогою та надати інформацію про продукт. Для мінімізації ризику контакту під час роботи застосовувати особисті захисні засоби, такі як рукавички, маска на обличчя і окуляри.

При потрапленні препарату до шлунково-кишкового тракту чи дихальних шляхів слід негайно звернутися до лікаря. Для ізоляції робочого поля та захисту пацієнта рекомендовано застосовувати кофердам.

Необхідно подбати про правильне опромінення полімеризаційною лампою, особливо у важкодоступних місцях. Слід переконатися, що під час полімеризації весь шар BOSTON GLAZE пронизується світлом. Неполімеризований композит може викликати алергічні реакції у пацієнта. У випадку забруднення неполімеризованої BOSTON GLAZE потрібно усунути забруднений шар матеріалу і внести наступний, правильно опромінити.

Уникати забруднення поверхні флакону і крапельниці (ризик перехресного зараження).

Для уникнення випадкової полімеризації BOSTON GLAZE закривати флакон відразу після використання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

 Зберігати у недоступному для дітей та сторонніх осіб місці. Зберігати у захищеному від світла місці. Полімеризація композиту може розпочатись в оточуючому світлі.

Не перегрівати. Не заморожувати.

Застосовувати відповідно до інструкцій виробника.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі не вище 25°C. Не наражати на безпосередню дію сонячного світла.

У разі зберігання при зниженій температурі, перед використанням BOSTON GLAZE необхідно довести до кімнатної температури.

Продукт призначений виключно для стоматологів і зубних техніків.

ГАРАНТІЯ

Фірма АРКОНА дає можливість заміни або повернення вартості товару, у випадку підтвердженої вади.

Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок неправильного чи неналежного використання матеріалу.

Дата останньої актуалізації інструкції: 08.03.2021



Ексклюзивний
дистриб'ютор:
Альпен Фарма АГ
Берн, Швейцарія



Уповноважений представник в Україні:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАТУРФАРМ» (ПрАТ «Натурфарм»)
04075 Україна, Київ, Пуща-Водиця,
вул. Лісна 30-А, Тел. (044) 401-81-03



ARKONA

АРКОНА Лабораторія Стоматологічної
Фармакології Гжегож Кальбарчик
Насутув 99С, 21-025 Немце, Польща
www.arkonadent.com